

COMMENT AIDER UNE VICTIME D'UN ARRÊT CARDIAQUE SOUDAIN

Un arrêt cardiaque peut arriver n'importe où, à n'importe quel moment. Le cœur cesse de battre inopinément, et les meilleures chances de survie de la victime reposent sur la mise en place immédiate d'une RCP et d'un intervenant équipé d'un DAE. **Ne paniquez pas. Vous pouvez aider.**

COMMENT VOUS POUVEZ AIDER

Directives ERC 2021 pour les secouristes non professionnels

Vérifier que l'environnement est sans danger

Vérifier l'état de conscience de la victime

Appeler les services d'urgence

Ouvrir les voies respiratoires de la victime

Vérifier la respiration

Commencer à faire des compressions thoraciques

À l'arrivée du DAE, suivre les instructions vocales et visuelles

COMMENT ZOLL PEUT AIDER


DAE ZOLL® avec évaluation en temps réel de la RCP




Vérifier l'état de conscience de la victime : « Ça va ? »



Appeler les services d'urgence

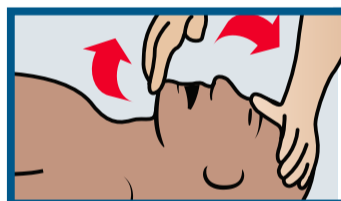


Ouvrir les voies respiratoires de la victime, vérifier la respiration

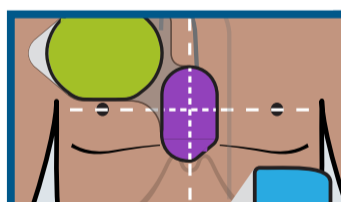

« Fixer les électrodes du DAE à la poitrine nue du patient »



« Ne pas toucher la victime, analyse en cours »

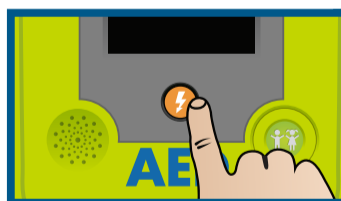


Si un choc est conseillé :
« Appuyer sur le bouton de choc clignotant »

valable pour les versions semi-automatiques*



Si aucun choc n'est conseillé et après la délivrance du choc :
« Commencer la RCP »

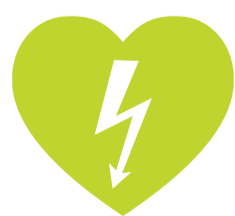

Les DAE de ZOLL offrent une assistance tout au long du processus de RCP avec des conseils et une évaluation en temps réel de la profondeur et de la fréquence des compressions. Ceci aide les intervenants à administrer la meilleure RCP possible afin d'augmenter les chances de survie de la victime.